

BEDIENUNGSANLEITUNG DE

[Name] Partikelfilter-Halbmaske

[Modell] KF-A F10 (SC)

[Klasse] EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

[Anwendbare Norm] EN 149:2001 +A1:2009

[Spezifikation] 23 cm x 12 cm

[Produktbeschreibung]

Dieses Produkt besteht aus PP-Vliesstoff, schmelzgeblasenem PP-Vliesstoff, Spinnvliesstoff, Nasenclip und Ohrschlaufen. Es handelt sich um eine partikelfiltrierende Halbmaske, die bei trockener oder feuchter Haut und bei Kopfbewegungen eine ausreichende Abdichtung des Gesichts des Trägers gegen die Umgebungsatmosphäre gewährleisten soll. Diese Maske soll sowohl gegen feste als auch gegen flüssige Aerosole schützen. Diese Maske ist eine nicht wiederverwendbare partikelfiltrierende Halbmaske. Diese Maske ist ausschließlich für den persönlichen Schutz bestimmt.

[Bestimmungsgemäße Verwendung]

Dieses Produkt, das normalerweise in der allgemeinen Arbeitsumgebung verwendet wird, soll einen zuverlässigen Atemschutz bieten und vor bestimmten luftgetragenen Partikeln und Staub schützen, Körperflüssigkeiten blockieren und so weiter.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

[Anleitung]

1. Entfalten Sie die Maske und ziehen Sie die Bänder an beiden Enden um die Ohren herum und positionieren Sie die Maske auf Ihrem Gesicht mit dem verstellbaren Metallstreifen nach oben zeigend.
2. Befestigen Sie, wenn gewünscht, die Bänder in der dafür vorgesehenen Halterung hinter dem Kopf.
3. Pressen Sie den Metallstreifen leicht nach unten, um zu gewährleisten, dass die Maske sicher versiegelt und der Nasenform angepasst ist.
4. Drücken Sie die Maske leicht auf Ihr Gesicht auf, um sie der Gesichtsform anzupassen.

[Vorsichtsmaßnahmen]

1. Diese Maske, die mit "NR" gekennzeichnet ist, darf nicht für mehr als eine Schicht verwendet werden.
2. Niemals Teile in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration ersetzen, ändern, hinzufügen oder weglassen.
3. Diese Maske trägt zum Schutz gegen bestimmte partikelförmige Verunreinigungen bei, schließt jedoch das Risiko einer Erkrankung oder Infektion nicht vollständig aus.
4. Verwenden Sie die Partikelhalbmaske nicht mit Gesichtsbehaarung oder anderen Bedingungen, die eine gute Gesichtsabdichtung verhindern können, die Anforderungen an eine Leckage werden nicht erfüllt.
5. Verwerfen und ersetzen Sie die Maske, wenn:
 - a) Die Maske wird entfernt, während sie sich in den kontaminierten Bereichen befindet.
 - b) Das Verstopfen der Maske verursacht Atembeschwerden.
 - c) Die Maske beschädigt wird.

[Haltbarkeit] 2 Jahre

[Lager- und Transportbedingungen] Halten Sie die Masken in der Verpackung bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern.

Umgebungstemperatur zwischen -30°C bis +70°C, und relative Luftfeuchtigkeit <80%, kein korrosives Gas, gute Belüftung. Während des Transports von Feuchtigkeit, Licht und Wärme fernhalten.

[Produktionsdatum] Siehe Paket

[Chargencode] Siehe Paket



GUANGDONG KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD.

No. 28 Delong Avenue, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City,
Guangdong Province, China.



+86 020-6622-1744



medical@kingfa.com.cn



http://www.kingfa.com.cn



Lotus NL B.V.



Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.